

## Wasch- und Pflegeanleitung

Für die normale Reinigung und Desinfektion der Lagerungskissen verwenden Sie bitte ausschließlich DGHM-zugelassene Desinfektionsmittel. Schutzbezüge aus Polyurethan können sprühdesinfiziert oder mit einem in Desinfektionsmittel getränktem Tuch abgewischt werden.

Die Anwendung von alkoholhaltigen Desinfektionsmitteln ist zu vermeiden. Farbige, zum Beispiel jodhaltige, Desinfektionsmittel können Verfärbungen verursachen, während chemische, zum Beispiel chlorhaltige, Reinigungsmittel brüchige Verhärtungen verursachen, die zu Undichtheit führen.

Hygieneschutzbezüge können gemäß RAL-GZ 992-3 gewaschen werden. Schließen Sie vor dem Waschen die Klett- bzw. Flauschverschlüsse, um das Verfusseln mit abgelösten Fasern und Schwebeteilchen zu vermeiden.

**Hygieneschutzbezüge dürfen bis 60°C gewaschen werden.**

**Hygieneschutzbezüge dürfen nicht im Tumbler getrocknet werden.**

**Hygieneschutzbezüge dürfen nicht in der VDV-Kammer oder im Autoklaven sterilisiert werden.**

**Hygieneschutzbezüge dürfen nicht gepresst werden.**

**Hygieneschutzbezüge dürfen nicht gebügelt werden.**

---

Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

**T +49 (0) 34299 - 704160**  
**[www.padcon-medical.de](http://www.padcon-medical.de)**

---

### Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch.

Da wir Lagerungshilfen in Handarbeit anfertigen, stehen wir individuellen Wünschen offen gegenüber. Gern stellen wir Sonderanfertigen entsprechend Ihrer Bedürfnisse her.

Alle Produkte können auch mit einem Kunstlederbezug oder einem bis zu 95°C waschbaren Hypro-Elastic-Bezug gefertigt werden.

Bitte beachten Sie, dass Sonderanfertigungen vom Rückgaberecht ausgeschlossen sind.

