


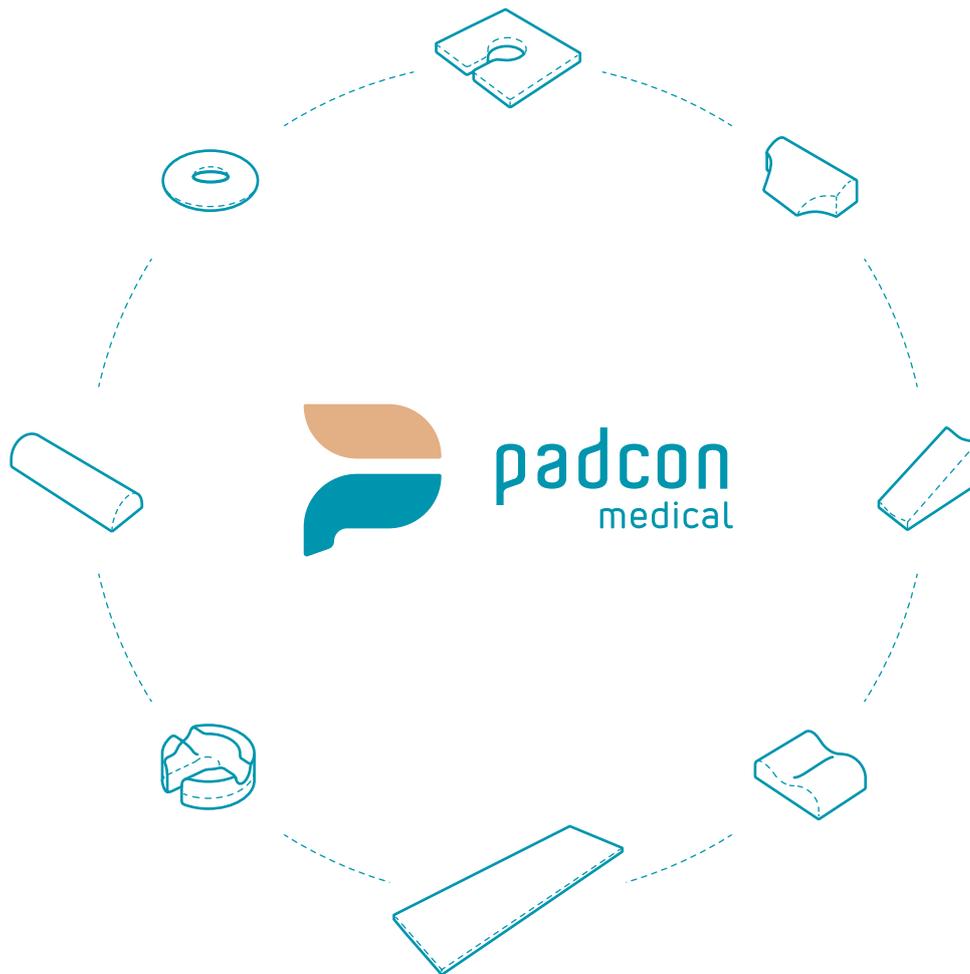

ANWENDUNGSBROSCHÜRE

für druckentlastende Lagerungskissen



Ihr Spezialist für druckentlastende Lagerungshilfen

Die padcon medical GmbH konzentriert sich seit 20 Jahren auf die Herstellung medizinischer Lagerungs- und Positionierungshilfen. Als Manufaktur mit Produktionsstätte in Sachsen führen wir ein breites Sortiment an Artikeln für die Patientenlagerung. Diese finden Einsatz im Klinik- und Altenpflegebereich, um Druckgeschwüre vorzubeugen, einen bestehenden Dekubitus zu therapieren sowie die Entstehung einer Intertrigo oder einer Kontraktur zu vermeiden.

Ein Dekubitus bezeichnet ein örtlich begrenztes Absterben (Nekrose) der Haut und wird dadurch auch als Druckgeschwür bezeichnet. Man spricht auch vom Wundliegen, da ein Dekubitus vor allem Menschen betrifft, die lange Zeit im Bett liegen müssen.

Ein gesunder Mensch spürt normalerweise, wenn eine Entlastung des Gewebes nötig ist und ändert seine schmerzhafteste Haltung. Ein kranker Mensch mit eingeschränkter Beweglichkeit kann dies nicht. Betroffen sind meist bettlägerige Patienten mit schweren Grunderkrankungen. Die Druckgeschwüre bilden sich am häufigsten am Kreuzbein und an den Fersen.

Unsere Lagerungskissen bilden in der Kombination einzelner Produkte und spezieller Lagerungstechniken die perfekte Ergänzung zur Vorbeugung eines solchen Dekubitus.

Weitere Details entnehmen Sie unserer Website unter www.padcon-medical.de.

Auf die richtige Pflege kommt es an

Hygieneschutzbezug, Material: Polyurethan



Der Bezug kann mit handelsüblichen, milden Reinigungsmitteln (keine chlorhaltigen oder bleichenden Mittel verwenden) bzw. handelsüblichen Desinfektionsmitteln gereinigt und desinfiziert werden. Bitte lassen Sie den Bezug gut trocknen. Nach entsprechender Trocknung ist der Bezug schnell wieder einsetzbar.



Der Bezug kann bei 60°C in der Maschine gewaschen werden. Keine Weichspüler verwenden! Für eine anschließende Trocknung bitte keinen Trockner oder Tumbler verwenden, da der Bezug für diese Trocknung nicht geeignet ist.



Baumwollbezug, Material: 100 % Baumwolle



Der Bezug kann bei 40°C in der Maschine gewaschen werden. Keine Weichspüler bzw. Bleichmittel verwenden! Für eine anschließende Trocknung kann der Bezug in einem Trockner bzw. Tumbler getrocknet werden. Eine Desinfektion des Bezugs ist nicht möglich.



Inlett, Füllung: Schaumstofflocken und Styroporkügelchen

Unsere Inletts sind befüllt mit druckentlastenden Schaumstofflocken und Styroporkügelchen. Diese Kombination stellt in der Pflege ein bewährtes Füllmaterial zur bestmöglichen Positionierung von pflegebedürftigen Menschen dar. Es passt sich an die Körperkontur an und unterstützt die entsprechende Lagerungstechnik.



Das Inlett kann bei 60°C in der Maschine gewaschen werden. Keine Weichspüler und Bleich- bzw. Chlormittel verwenden! Für eine anschließende Trocknung kann das Inlett mit einem gemäßigten Trocknungsvorgang getrocknet werden.



Hygieneschutzbezug Polyurethan (waschbar bis 60°C)



(-P1) – Hygieneschutzbezug, navyblau



(-P2) – Hygieneschutzbezug, weiß

Baumwollbezug 100% Baumwolle (waschbar bis 40°C)



(-B1) – Baumwollbezug, grau



(-B2) – Baumwollbezug, braun

Inlett Schaumstoffflocken und Styroporkügelchen



Lagerungsset 4-teilig



LAGERUNGSSET, 4-teilig


mit Reißverschluss

Abmessungen

- 1 x Lagerungsschlange (PD 05020)
- 1 x Lagerungskissen 80 (PD 05040)
- 1 x Lagerungskissen 40 (PD 05060)
- 1 x Beinlagerungskissen (PD 05080)

Artikelnummer

PD05100

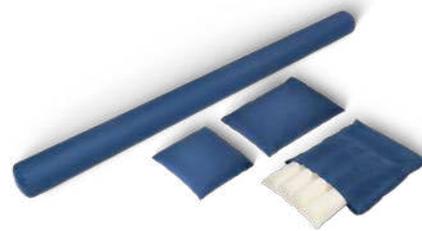

Bezug · Hygieneschutzbezug oder Baumwollbezug
Kern · Schaumstoffflocken / Styroporkugeln

Sonderfarben

Bezug · Baumwollbezug (100% Baumwolle)



Lagerungsschlange



Beschreibung

Unsere Lagerungsschlangen ermöglichen anhand ihrer Beschaffenheit und Form eine optimale Positionierung des Patienten für die 30°-Lagerung oder 135°-Lagerung. Bei dieser Positionierung wird im Wechsel die rechte oder linke Körperhälfte belastet. In der Regel empfehlen wir mit einer 2- bis 3-stündlichen Umlagerung zu beginnen und das Intervall bei Hautveränderungen entsprechend anzupassen.



30°-Lagerung



135°-Lagerung

LAGERUNGSSCHLANGE

mit Reißverschluss

Abmessungen

2400 x Ø 200 mm

1600 x Ø 150 mm

Artikelnummer

PD05020

PD05021



Sonderfarben

Bezug · Baumwollbezug (100% Baumwolle)

Bezug · Hygieneschutzbezug oder Baumwollbezug
Kern · Schaumstoffflocken / Styroporkugeln



Lagerungskissen



Beschreibung

Die Lagerungskissen werden ebenso wie die Lagerungsschlangen vorwiegend zur 30°-, 135°- und VAT-Lagerung verwendet.


Die 30°-Positionierung wird mit Hilfe von zwei Lagerungskissen erreicht, die auf die Hälfte gefaltet werden. Das erste wird rechts oder links der Wirbelsäule unter den Rücken gelegt, das zweite unter den entsprechenden Oberschenkel. Diese Form der Lagerung bedarf einiger Übung und Drehtechnik und sollte nur von ausgebildetem Fachpersonal angewendet werden.

Auch bei der 135°-Lagerung wird mit zwei Lagerungskissen gearbeitet, wobei eines unter eine Hälfte des Oberkörpers gebracht wird und das andere unter die entsprechende Hüfte und Oberschenkel. Gefährdete oder betroffene Körperstellen können durch eine Freilagerung entlastet werden.

Die VAT-Lagerung dient der Dehnung des Brustkorbs und somit der besseren Belüftung der Lunge. Die Lage der Kissen unter dem Rücken des Patienten beschreibt dabei den jeweiligen Buchstaben der Lagerungstechnik.




135°-Lagerung

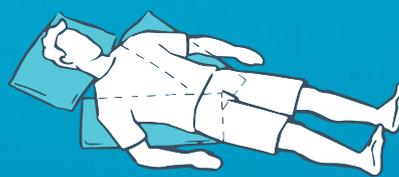

V-Lagerung: Förderung Flankenatmung + Dehnung untere seitl. Lungenabschnitte



A-Lagerung: Dehnung der oberen Lungenabschnitte bzw. -spitzen

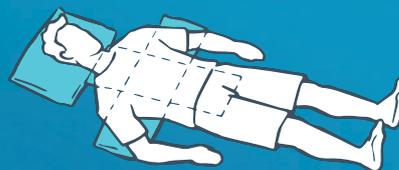


T-Lagerung: Dehnung des gesamten Brustkorbs

LAGERUNGSKISSEN

mit Reißverschluss

Abmessungen	Artikelnummer
750 x 250 mm	PD05030

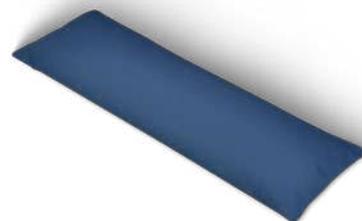

Bezug · Hygieneschutzbezug oder Baumwollbezug
Kern · Schaumstoffflocken / Styroporkugeln

Sonderfarben 
Bezug · Baumwollbezug (100% Baumwolle)



LAGERUNGSKISSEN

mit Reißverschluss

Abmessungen	Artikelnummer
800 x 400 mm	PD05040
600 x 400 mm	PD05050



Bezug · Hygieneschutzbezug oder Baumwollbezug
Kern · Schaumstoffflocken / Styroporkugeln


Sonderfarben 
Bezug · Baumwollbezug (100% Baumwolle)



LAGERUNGSKISSEN

mit Klett- oder Reißverschluss

Abmessungen	Artikelnummer
400 x 400 mm	PD05060
300 x 400 mm	PD05062
500 x 400 mm	PD05061

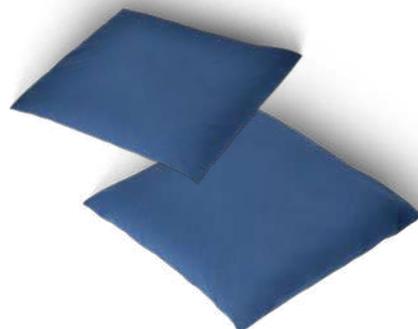

Bezug · Hygieneschutzbezug oder Baumwollbezug
Kern · Schaumstoffflocken / Styroporkugeln

Sonderfarben 
Bezug · Baumwollbezug (100% Baumwolle)



Beinlagerungskissen gekammert



Beschreibung

Das gekammerte Beinlagerungskissen dient der Fersen- bzw. Beinfreilagerung. Die einzelnen Kammern des Kissens können entsprechend der gewünschten Lagerung gefaltet werden. Dadurch wird eine Freilagerung erzielt, bei der darauf zu achten ist, dass das Knie nicht überstreckt wird. Mit einer zusätzlichen Lagerungsrolle oder einem Kissen unter dem Knie kann ein Überstrecken vermieden werden.



Unterstützung zur Bauchentlastung -----



Freilagerung der Fersen -----

BEINLAGERUNGSKISSEN

mit Reißverschluss

Abmessungen

750 x 750 mm mit 4 Kammern
750 x 550 mm mit 3 Kammern

Artikelnummer

PD05080
PD05081



Bezug · Hygieneschutzbezug oder Baumwollbezug
Kern · Schaumstoffflocken / Styroporkugeln

Sonderfarben

Bezug · Baumwollbezug (100% Baumwolle)



Armlagerungskeilkissen



Beschreibung

Unsere Armlagerungskeilkissen dienen der druckentlastenden Lagerung der Arme und Hände. Bei dieser Lagerung wird der Arm auf das Lagerungskissen positioniert und bei Bedarf regelmäßig umgelagert.



Druckentlastung von Arm und Hand -----

ARMLAGERUNGSKEILKISSEN

mit Reißverschluss

Abmessungen

400 x 600 x 200/0 mm
300 x 500 x 150/0 mm

Artikelnummer

PD05090
PD05095



Bezug · Hygieneschutzbezug oder Baumwollbezug
Kern · Schaumstoffflocken/Styroporkugeln

Sonderfarben

Bezug · Baumwollbezug (100% Baumwolle)



Lernen Sie padcon medical kennen

Der Manufakturbetrieb für Lagerungshilfen

+49 (0) 34299 - 704160
info@padcon-medical.de

Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 9:00 bis 16:00 Uhr

Sie haben Fragen an padcon medical?

Gern beraten wir Sie ausführlich rund um unsere **Produktvielfalt** und den damit verbundenen Produktionsprozessen. Von der **Aufbereitung** bis zur **Sonderanfertigung** setzen wir Ihre Aufträge zuverlässig und lösungsorientiert um. Darüber hinaus bieten wir als Experte für Lagerungshilfen ein breites **Schulungsangebot** für die korrekte Nutzung unserer Positionierungskissen an. **Kontaktieren Sie uns.**

Weitere Details erhalten Sie auf unserer Website.

www.padcon-medical.de



padcon medical GmbH

Hauptstraße 16
04564 Böhlen

T +49 (0) 34299 - 704160

F +49 (0) 34299 - 704161

info@padcon-medical.de

www.padcon-medical.de